



Réaction en cas de crise cardiaque



1
Tout d'abord, appeler le numéro d'alerte national ou demander à quelqu'un d'appeler.

2
Ouvrir le couvercle du CardiAid, enlever le vêtement de la poitrine du patient et soulever un peu le menton. Suivre les instructions orales.



3
Ouvrir le paquet d'électrodes et appliquer ces dernières sur la poitrine dénudée du patient.

4
Ne pas toucher au patient à partir de maintenant. Le CardiAid analyse automatiquement le rythme cardiaque et détecte si un choc est nécessaire.



5
Le CardiAid prépare le choc le cas échéant.

6
Veiller à ce que personne ne touche le patient. Ensuite, suivre les instructions du CardiAid et appuyer sur le bouton clignotant de choc.



7
Après le choc, le patient peut être touché. S'il n'y a aucun signe de vie menant à une réanimation, faire alternativement 30 compressions thoraciques et 2 bouche-à-bouche.

8
Après 120 secondes (en fonction de la configuration), une nouvelle analyse du rythme cardiaque commencera et un deuxième choc sera préparé le cas échéant. Voir le point 4 sur la manière de manipuler et suivre les instructions du CardiAid.

